


Användarmanual

Klickbox T7 kontaktlåda


En kontaktlåda för sju manöverkontakter som ansluts via USB-porten på datorn. Kontaktlådan är en användarvänlig kommunikationsenhet som förmedlar knappklick och tangentbordstryck till en dator. Enheten har sju ingångar för knappar som kan ersätta tangentbordstryckningar eller klick från en ordinarie musknapp.

Klickbox är en kontaktlåda utvecklad hos Motion Control.

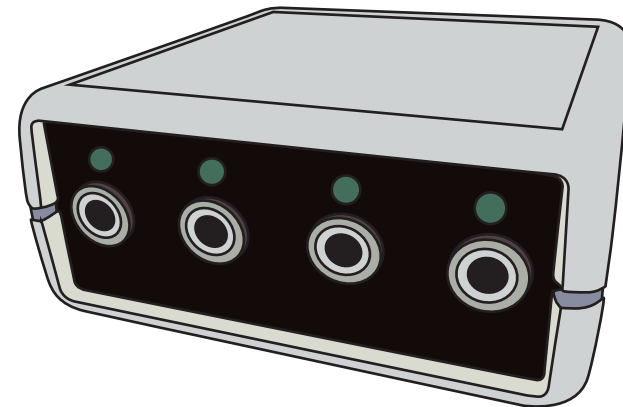

Koppla in Klickbox till datorn

- Anslut den medföljande USB-kabeln till kontaktlådans USB-ingång.
- Koppla in USB-kabeln i datorn.
- När den röda lampan ovanför USB-ingången på Klickbox tänds är kontaktlådan färdig att använda. Den har då standardinställning:
 - 1 — Vänsterklick
 - 2 — Dubbeklick
 - 3 — Enter
 - 4 — Piltangent upp
 - 5 — Piltangent ner
 - 6 — Piltangent höger
 - 7 — Piltangent vänster
- Koppla in önskvärt antal manöverkontakter. Vill du ändra inställningarna för manöverkontakterna måste programmet för Klickbox installeras på datorn. Se nästa sida.

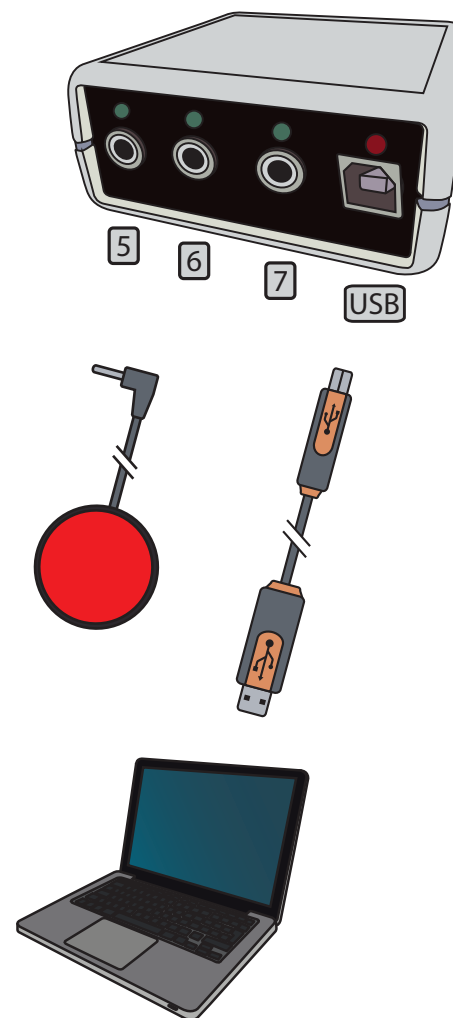

Installera programmet för Klickbox

- Klickbox levereras med standardinställningar, inställningarna ändras i det medföljande programmet. För installation på Windows:
Mata in installationsskivan i datorn.
- Klicka på *Start* och sedan *Dator*. Du får då upp datorns anslutna enheter, dubbelklicka på DVD-enheten.
- Dubbelklicka på ikonen för Klickbox installationsprogram, *Klickbox setup*.
- Installationen startas. Godkänn installationen om en dialogruta kommer upp på skärmen. När en ikon för programmet skapas på skrivbordet är programmet installerat.
- Starta programmet genom att dubbelklicka på ikonen för Klickbox på datorns skrivbord. I programmet kan du göra inställningar för respektive manöverkontakt som är inkopplad i kontaktlådan.

Möjliga inställningar för manöverkontakt:

- Högerklick
- Vänsterklick
- Mittenklick
- Dubbelklick
- Enter
- Piltangent upp
- Piltangent ner
- Piltangent höger
- Piltangent vänster

Ändra inställningarna i Klickbox

- Öppna programmet för Klickbox. Här ändras inställningarna för respektive manöverkontakt.

OBS!

Kontaktlådan måste vara inkopplad i datorn!

- Alla inställningar sparas automatiskt i kontaktlådan när du ändrar dem.
- Användningen av Klickbox är oberoende av programmet, kontaktlådan kan användas i valfri dator.

Knappar
Inställningsläge för manöverkontakter

Scroll
Ej aktiv i denna version av Klickbox

Hjälp
Anslutning och felsökning

Om Klickbox
Information om produkten

Anslutning
Grön - ansluten
Röd - ej ansluten

Knapp
Välj knappfunktion för respektive manöverkontakt

Avsluta
Klicka för att stänga programmet

Kontakt

📍 Motion Control

Hemsida: www.motioncontrol.se

E-post: hjalpmedel@motioncontrol.se

Tfn: 021-44 85 000

- 📍 Klickbox T7 kontaktlåda produceras och utvecklas hos Motion Control. Dina synpunkter och frågor är viktiga i vårt arbete. Kontakta oss gärna!

